



Pronto in un batter d'occhio!




Aspirasaliva e aspiratore chirurgico

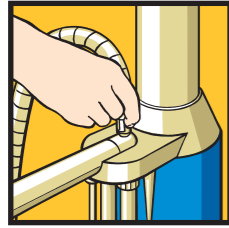


1. Aspirare acqua fredda, ad es. tramite KaVo AQUAmax®

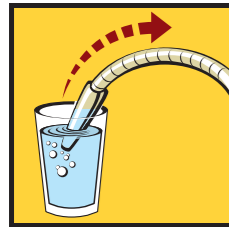


oppure, se non è disponibile, da un bicchiere di plastica

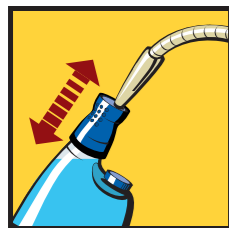

2. Con la cannula oppure con la mano premere una volta sul dosatore

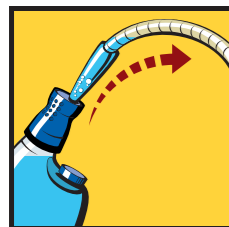


3. Aspirare DEKASEPTOL Gel dal dosatore*
*Se il tubo dell'aspiratore chirurgico è grosso ripetere le operazioni 1-3

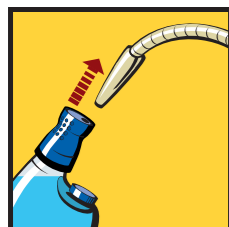

4. Togliere il tubo e riporlo nella faretra

Bacinella

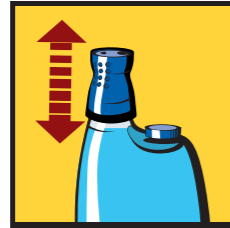

1. Premere una volta sul dosatore



2. Versare DEKASEPTOL Gel nella bacinella



3. Distribuire DEKASEPTOL Gel con un spazzolino e lasciar agire 5 minuti.



4. Al termine azionare il risciacquo e detergere con la spazzolina.



Il Vostro deposito dentale:

Sapremo consigliarvi con esperienza e professionalità. E con piacere!
Oggi anche su Internet: www.kavo.com



Disinfezione ecologica del cocco il naturale potere disinfettante.



KaVo. Dental Excellence.



KaVo. Dental Excellence.

Attenzione,

Facciamo chiarezza nella giungla degli agenti patogeni.

Zone a rischio: impianti di aspirazione. Lo sporco si deposita. Batteri, funghi e virus si annidano per dare la caccia alla salute. Non resta che distruggere i germi con le armi della natura!

Il principio attivo di DEKASEPTOL è la gluco-protamina – un derivato delle sostanze della noce di cocco. La glucoprotamina è un agente antimicrobico, che supera di gran lungo in forza e capacità il biguanide o i derivati del fenolo. Una cosa naturale e igienica per impianti di aspirazione, scarichi e bacinelle.

Un motivo in più per essere d'accordo: ciò che rende la vita difficile a batteri e virus, rende più facile il vostro lavoro. Ma guardate voi stessi!

Sicuro – pulito – economico – veloce

- altamente efficace: battericida, tuberculocida, virucida, fungicida
- economico: un flacone da 6 litri
- ecologico: niente aldeide, fenolo, o cloro
- risparmio di tempo: subito pronto grazie al dosatore
- pratico: nessuna miscela da preparare
- iscritto nella lista DGHM

DEKASEPTOL agisce come:

- detergente
- deodorante
- disinfettante

battericida	✓	tuberculocida	✓
fungicida	✓	HBV-attivo	✓
virucida	✓	HIV-attivo	✓

First choice – best value.

Pronti,

Non si impasta, non si agita, non si miscela.

Il valore del tempo è un tesoro inestimabile. Quindi, non perdetevi tempo a mescolare. DEKASEPTOL è una miscela già pronta all'uso immediato.

DEKASEPTOL si prende cura di voi e dei riuniti. Non impastare o mescolare vuol dire anche evitare errori di dosaggio, eliminare il contatto con le mani, non sporcare le superfici di lavoro. Insomma, una cosa assolutamente pulita.

Risparmio tangibile. Con il pratico dosatore nulla va disperso e sprecato. E il rifornimento si fa con l'economico flacone da 6 litri.

Smaltimento senza timori. Ciò che viene dalla natura, alla natura ritorna senza danno. DEKASEPTOL è ecologico, facilmente e velocemente biodegradabile come lo richiedono le normative OECD.

Via!

Prima finite, meglio è. Buona serata!

Non perdetevi tempo! DEKASEPTOL è maneggevole, è veloce. Aspirare il gel con le cannule, versarne una dose nella bacinella. Lasciar agire. Tutto qui!

Alle **18,00** la giungla è vinta. DEKASEPTOL ha lavorato per voi, facendovi guadagnare minuti preziosi.

"Noccioline"! Direte voi. "No, grosse, pesanti noci di cocco" rispondiamo noi. Facendo i conti il risparmio ammonta a **20** minuti per settimana.

In un anno **2** intere giornate di lavoro. Tempo che vi regala DEKASEPTOL, da spendere nel modo migliore. Prima si finisce, prima si va a casa.

