



Gebrauchsfertiges Tuch für den Einsatz in Kombination mit einem Mopphalter für Böden und harte Oberflächen.

## mikroloid® power mop

### Unser Plus

- sporizid
- ready-to-use
- einfache Handhabung

### Anwendungsgebiete

Einsatz für Böden und andere harte Oberflächen.

### Anwendungshinweise

Zur Verwendung mit einem geeignetem Mopphalter mit Kletthaftung. Handschuhe tragen. Mopp entnehmen und wischen. Auf vollständige Benetzung achten. Deckel der Spenderbox abnehmen. Folienbeutel in Spenderbox einlegen und öffnen. Deckel wieder fest verschließen.

**Haltbarkeit nach Anbruch:** 1 Monat. Bei alternativer Anwendung ohne Spenderbox ist das Produkt innerhalb eines Tages zu verbrauchen. Wiederbefüllbare Spenderbox, geeignet nur für die Verwendung mit einem Nachfüllpack "mikroloid power mop"! Nur für berufsmäßige Verwender.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
<b>bakterizid</b> EN13727, EN16615	gebrauchsfertig	5 Min.
<b>mykobakterizid</b> EN16615	gebrauchsfertig	15 Min.
<b>fungizid</b> EN13624, EN16615	gebrauchsfertig	15 Min.
<b>begrenzt viruzid PLUS</b> EN14476	gebrauchsfertig	5 Min.
<b>viruzid</b> EN14476	gebrauchsfertig	30 Min.
<b>sporizid</b> EN17126	gebrauchsfertig	60 Min.



## Produktfaten

### Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 0,048 g Peressigsäure, 0,12 g Glycolsäure, weitere Inhaltsstoffe: Wasserstoffperoxid

## Besondere Hinweise

Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Vorsichtsmaßnahmen: Schutzhandschuhe tragen. Nicht zur Desinfektion von Buntmetallen und säureempfindlichen Oberflächen geeignet. Im Zweifel ist die Eignung vor der erstmaligen Anwendung an unauffälliger Stelle zu prüfen.

### mikrofid power mop:

mikrofid power mop Set:

Karton mit 1 Eimer + Refill mit 20 Tüchern

Artikel Nummer: 70003372

mikrofid power mop Refill:

Karton mit 2x Refill Bag mit 20 Tüchern

Artikel Nummer: 70003237

### Zubehör:

Equipment:

Karton mit 1 x Wandhalterung

Artikel Nummer: 60000489

Karton mit 1 x Wischmop

Artikel Nummer: 60000488

Karton mit 6 x Klettpad

Artikel Nummer: 60000490

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mikrofid power mop Set Refill 20er + Box	1/Karton	70003372

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

Manufacturer:  
S,U.MO. GmbH  
Kirchstr. 28  
21227 Bendestorf  
GERMANY  
Tel. +49 40 328907271



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)