

Anatomisch korrekte Kontaktpunkte
und Konturen mit einem Dreh!

Palodent® V3
Teilmatrizensystem



Palodent® 360
Vollmatrizensystem

Eine gute Versiegelung. Vorhersagbare Kontaktpunkte. Natürliche Konturen für klinischen Erfolg.

97%

der Zahnärzte sagen, dass es in mindestens 1 von 10 Fällen schwierig ist, eine gute Isolation zu erreichen.¹

70%


der Zahnärzte finden, die Kontaktpunktherstellung sei der schwierigste Teil einer Klasse II Restauration.²



Palodent® Matrizensysteme von Dentsply Sirona helfen dabei, eine zuverlässige Isolation und eine dichte gingivale Versiegelung zu erzielen. Mit ihrem innovativen Design war es noch nie so einfach, vorhersagbare enge Approximalkontakte wiederherzustellen. Und die vorgeformten Matrizen helfen dabei, anatomisch korrekte Konturen und Kontakte zu erzielen für bessere klinische Ergebnisse – ohne sperriges Zubehör, Einschränkung im Arbeitsfeld oder großen Aufwand beim späteren Finieren.

Weg mit der Tofflemire!

Die Tofflemire-Matrize wurde 1946 eingeführt, um die Platzierung von Amalgam-Füllungen zu erleichtern. Heute ist es ein veraltetes System, das in Verbindung mit modernen Kompositen zu klinischem Misserfolg führen kann.³ Dentsply Sirona hat die Matrizentechnik kontinuierlich verbessert, um die modernsten Teil- und Voll-Matrizen-systeme anbieten zu können: Palodent®-Matrizen für einfachere und bessere Restaurationen.

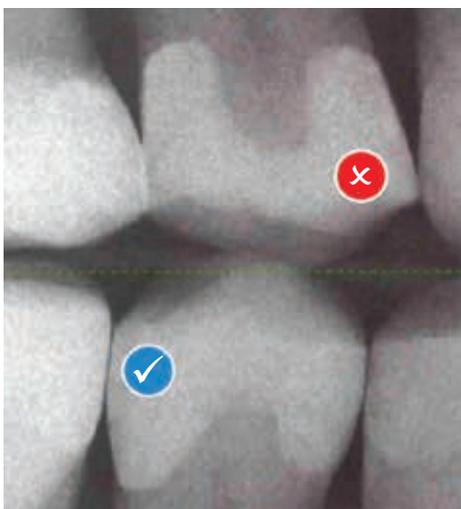

Tofflemire Vollmatrizensystem:

- ✘ Sperriges, unhandliches System
- ✘ Mangelhafter Aufbau der approximalen Anatomie und höheres Risiko von Frakturen, Sekundärkaries und Parodontalerkrankungen
- ✘ Dünner Kontakt an der Randleiste und Gefahr, Speisereste einzubeißen
- ✘ Zusätzlicher Aufwand beim Finieren

Palodent Matrizensystem:

- ✔ Anwenderfreundlich
- ✔ Natürliche Konturen
- ✔ Enge, anatomisch korrekte Kontakte
- ✔ Minimaler Finierbedarf im Approximalraum

¹ Dental Learning Systems, Direct Restoratives Survey, May 2016. N=143

² DentalTown (2012). Restorative Dentistry. Monthly Poll: What is the most challenging part of ClassII Restoration?

³ Owens BM, Phebus JG, An evidence-based review of dental matrix systems, "General Dentistry," September/October 2016

Palodent® V3

Teilmatrizensystem

Ganz einfach natürliche Konturen und enge Kontaktpunkte erzielen für bessere Ergebnisse.
 Das Palodent® V3 System ist ideal für die meisten 2-flächigen Kompositrestaurationen bei Klasse II Kavitäten.






Verwenden Sie das Palodent® V3 System für:

Mesial-okklusal

Distal-okklusal

Mesial-okklusal-distal

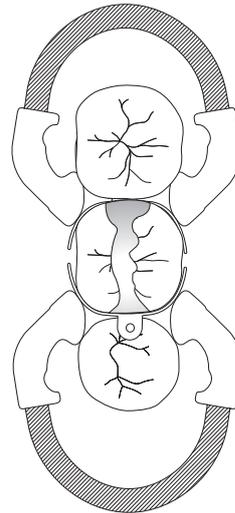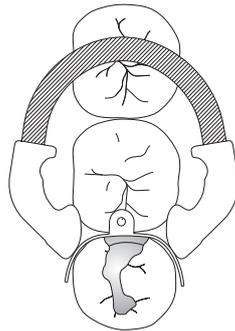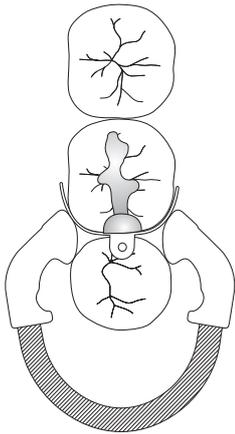

Palodent® 360

Vollmatrizensystem

Natürliche Konturen und optimale Kontakte mit einem Fingerdreh - ohne sperrige Halter oder Applikatoren.
 Wählen Sie das Palodent® 360 System für solche Klasse II Fälle, in denen keine Teilmatrize verwendet werden kann sowie für den Stumpfaufbau.







Verwenden Sie das Palodent® 360 System für:

Fehlender Höcker

Fehlender Nachbarzahn

Fehlstellung des Zahnes

Isolation beim Stumpfaufbau

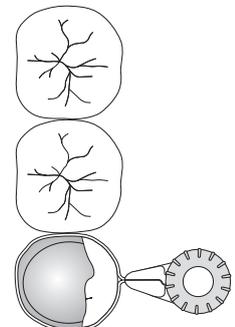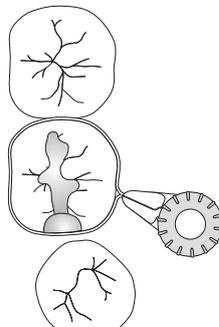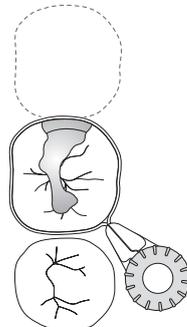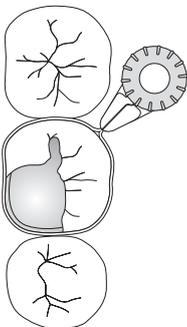

TIPP Bei zu engem Kontakt, vorher mit einem Palodent® V3 Ring oder einem Holzkeil separieren, um so das Legen der Matrizen zu vereinfachen.

Bestellinformationen

Palodent® Matrizensysteme

Palodent® V3 & 360 Komplettsystem

24 x Palodent® 360 Matrizen 5,5 mm
100 x Palodent® V3 Matrizen
(je 25 x 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm)
75 x Palodent® V3 Keile
(je 25 x klein, mittel, groß)
30 x Palodent® V3 WedgeGuards
(je 10 x klein, mittel, groß)
1 x Palodent® V3 Ring universal
1 x Palodent® V3 Ring klein
1 x Palodent® V3 Applikationszange
1 x Palodent® V3 Spezialpinzette

659600V

Nachfüllpackung WedgeGuard

50 x klein – dunkelblau
50 x mittel – mittelblau
50 x groß – hellblau

659830V
659840V
659850V

Nachfüllpackung Keile

100 x klein – dunkelblau
100 x mittel – mittelblau
100 x groß – hellblau

659780V
659790V
659800V

Nachfüllpackung Matrizen

50 x 3,5 mm
50 x 4,5 mm
50 x 5,5 mm
100 x 5,5 mm
50 x 6,5 mm
50 x 7,5 mm

659710V
659720V
659730V
659740V
659750V
659860V

Palodent® V3 Teilmatrixsystem



Palodent® V3 Komplettsystem

100 x Matrizen, 75 x Keile,
30 x WedgeGuards, 1 x Universalring,
1 x kleiner Ring, 1 x Applikationszange,
1 x Spezialpinzette

659700V

Nachfüllpackung EZ Coat Matrizen

50 x 3,5 mm
50 x 4,5 mm
50 x 5,5 mm
90 x 5,5 mm
50 x 6,5 mm
50 x 7,5 mm

659610V
659620V
659630V
659640V
659650V
659660V

Palodent® V3 EZ Coat Komplettsystem

100 x Matrizen, 75 x Keile,
30 x WedgeGuards, 1 x Universalring,
1 x kleiner Ring, 1 x Applikationszange,
1 x Spezialpinzette

659670V

1 x Applikationszange
1 x Spezialpinzette

659810V
659820V

Palodent® V3 Startersystem

20 x Matrizen, 15 x Keile,
5 x WedgeGuards, 2 x Universalring,
1 x Applikationszange,
1 x Spezialpinzette

62500005

Palodent® 360 Vollmatrixsystem



Matrizen-Nachfüllpackung

48 x 4,5 mm Matrizen – dunkelblau
48 x 5,5 mm Matrizen – mittelblau
48 x 6,5 mm Matrizen – hellblau

659601
659602
659603

Nachfüllpackung Ringe

2 x Universalringe
2 x Ringe klein
1 x Universalring

659760V
659770V
659900V

Dentsply Sirona Deutschland GmbH

Fabrikstr. 31
64625 Bensheim
DEUTSCHLAND

dentsplysirona.com · pre@dentsplysirona.com
Service-Line für Deutschland: 08000-735000 (gebührenfrei)
Service-Line für Schweiz und Österreich: 00800-00735000 (gebührenfrei)

Besuchen Sie uns auf [f facebook.com/dentsplysirona](https://www.facebook.com/dentsplysirona)

7460-62028.6

© Dentsply Sirona 03/2020